




Consejos Para Parches


CeQur Simplicity™
MEALTIME INSULIN SIMPLIFIED™

SITIOS DE APLICACIÓN

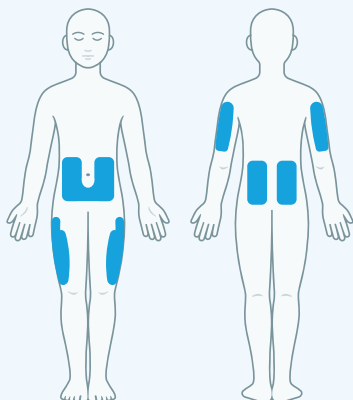


Coloque el parche en cualquier área azul.
Asegúrese de poder hacer clic en ambos botones.

COLOCACIÓN DEL PARCHES

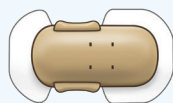

Coloque horizontalmente en el abdomen y la parte de atrás

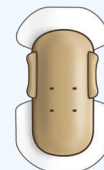

Coloque verticalmente en los brazos y los muslos

- Remueva el vello corporal excesivo de donde colocará el parche
- Evite lociones, protector solar, perfume o medicamentos alrededor del área del parche
- Use dos toallitas de alcohol para limpiar la piel: la primera para levantar la suciedad y los aceites de la piel, y la segunda para remover la suciedad y los aceites de la piel
- Permita que el área se seque completamente antes de colocar el parche
- Evite mojar el parche durante 3 horas después de la colocación
- Rote los sitios con cada cambio de parche


Si necesita ayuda adicional para **adherir el parche de forma segura y para removerlo con cuidado**, a continuación encontrará una lista de productos que pueden ayudar.

AYUDE A QUE SU PARCHES SE ADHIERA



Producto*	Descripción
Skin Tac™ torbot.com	Una barrera cutánea adhesiva hipoalergénica y sin látex, en forma de toallita y de líquido
SKINPREP® Protective Wipes smith-nephew.com	Las toallitas protectoras forman una barrera que permite que la piel respire, para que las cintas y los apósitos se adhieran mejor
IV Prep™ Wipes smith-nephew.com	Deja una capa pegajosa que podría ayudar a reducir el trauma cutáneo
AllKare® Wipes convatec.ca	Las toallitas protectoras sin látex forman una capa en la piel para ayudar a proteger contra la irritación
Mastisol® Adhesive eloquesthealthcare.com	Adhesivo líquido no irritante y no soluble en agua

AYUDE A REMOVER SU PARCHES

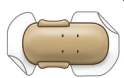

Producto*	Descripción
Baby Oil (genérico) por diferentes fabricantes	Hidratante suave
TacAway® Adhesive Remover torbot.com	Elimina los residuos de adhesivo en la piel
UNI-SOLVE™ Wipes smith-nephew.com	Suaviza y elimina los residuos de su piel



Sangrado y moretones leves y temporales en los sitios de aplicación pueden ocurrir. Si tiene sangrado activo en el sitio de aplicación, remueva el parche y reemplace con un parche nuevo en una nueva ubicación. Aplique presión firme en el área con sangrado con un paño estéril o limpio. **Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un mensaje de texto a CeQur Cares al 1-888-552-3787.**